


Silhouette[®]
VISIÓN SIN LÍMITES

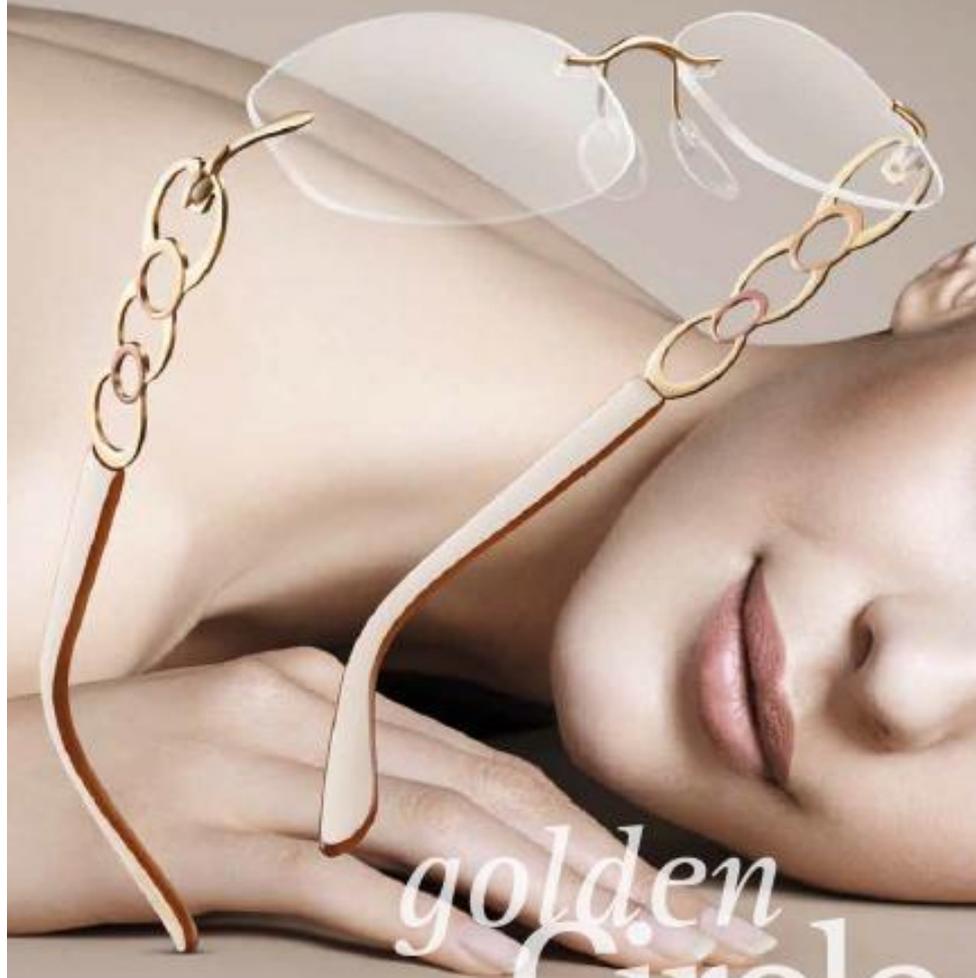

golden
Circle



04

*Golden Circle:
la inspiración*

06

*Montura al aire:
la mejor decisión*

08

*Individualización:
Recomendaciones
del asesor*

12

*Punto de venta: Una
puesta en escena perfecta*

14

*Silhouette:
una técnica única
e innovadora*





Sensualidad en toda su elegancia

Le damos la bienvenida a una nueva sensualidad, llena de etérea ligereza, con las Silhouette Golden Circle. Juegan de forma sutil con elementos clásicos para volver a fascinar con su aire moderno y curvilíneo. Un toque de lujo que hace resplandecer el rostro de cualquier mujer. Nunca antes se habían combinado los materiales de forma tan elegante: las nuevas Silhouette Golden Circle añaden el brillo seductor de una imagen metálica con el tacto sedoso de los extremos de las varillas, del innovador material SPX. Unas gafas de un refinamiento elegante y, al mismo tiempo, enormemente cómodas.

Son la reinterpretación moderna de la feminidad clásica: las Silhouette Golden Circle. Unos elegantes círculos brillantes de titanio de diversos tamaños enlazados entre sí confieren a estas gafas un aire totalmente especial. Su imagen refinada se completa con un fascinante juego de colores y reflejos. Todo ello es posible gracias a la innovadora combinación de titanio de alta tecnología con SPX. Finalmente, esta pieza única y femenina seduce por su estética montada al aire y la bisagra sin tornillos, patentada. En pocas palabras, las Silhouette Golden Circle son las gafas con las que toda mujer ha soñado siempre.

Montura al aire: ¡La mejor decisión!

Silhouette ha revolucionado el mundo de las gafas mediante cuatro paradigmas:

1 Tecnología innovadora

> Una idea convertida en diseño: Silhouette se dedica con pasión, desde 1994, al diseño de gafas únicas desde un punto de vista tecnológico: sin tornillos ni bisagras.

> Una increíble ligereza y, al mismo tiempo, la máxima resistencia a las roturas. El titanio de alta tecnología combinado con el innovador material de Silhouette, el SPX, patentado, hace que sean unas gafas elásticas, flexibles y que no requieran ningún mantenimiento especial.

> Un placer con el que las personas que llevan gafas no podían ni soñar: Los materiales de alta calidad sin riesgos de alergias, así como un diseño adaptable, con cantos redondeados, y agradable al tacto, lo hacen posible. ¡Las únicas gafas que no dejan marcas en la piel!

2 Una visión sin límites

> Una placentera visión sin límites: las Silhouette cambian nuestra manera de ver a través de las gafas. Con ellas es más libre, más abierta y sin ningún tipo de límites.

> Seguridad total en el día a día: sin monturas que interfieran en nuestro campo de visión, este se amplía. ¡Un punto a su favor en cada momento!

3 Un rostro abierto

> Un aspecto natural: la estética montada al aire y el discreto diseño de líneas puras permiten apreciar la armonía natural y la autenticidad de cualquier rostro.

> Lo importante aquí es la expresividad de cada uno: puede reconocerse rápidamente y sin problemas a la persona, y esta puede comunicarse perfectamente con la mirada.

> Las gafas Silhouette permiten ver el rostro de forma abierta y pura. Algo que también resulta ideal para el maquillaje diario.

4 Una puesta en escena individual

> Tan inconfundibles como cada persona, así deberían ser también las gafas. Por eso, en Silhouette, cada par de gafas es una pieza única, fabricada en Austria.

> Se adaptan a cada persona y quedan perfectas, en su sitio.

> Un reto en términos artísticos: las innumerables formas de cristales y varillas, así como la amplia gama de colores y detalles de las varillas, multiplican las posibilidades, consiguiendo una variedad ilimitada de modelos de gafas.

> Con las nuevas Silhouette Golden Circle eso se traduce en: 4 formas y colores de varillas de una elegancia fascinante, y formas redondeadas; así como 4 atractivas formas de cristales para las mujeres con estilo.

> Más prestigio y satisfacción a la hora de elegir sus gafas: como expertos con sensibilidad, los ópticos asesoran de forma competente a las clientas más exigentes durante el proceso de toma de decisión.

Una estética versátil

Recomendaciones y asesoramiento individual

Las gafas adecuadas subrayan la personalidad a la perfección. Con las siguientes recomendaciones, pretendemos facilitarle la tarea de encontrar las Silhouette Golden Circle ideales para las clientas que siguen la moda. Si se elige la forma de cristales adecuada se puede subrayar la expresividad del rostro, consiguiendo un efecto global de armonía. Para ello, elija primero la forma de los cristales conforme a la forma de las cejas. En las siguientes páginas encontrará nuestra exquisita gama cromática.

CEJAS EQUILIBRADAS



Mod. 6726

CEJAS ASCENDENTES



Mod. 6722

CEJAS MUY ARQUEADAS



Mod. 6724

CEJAS RECTAS



Mod. 6724



La elección cromática adecuada para cada persona

Cada persona es única. Las nuevas Golden Circle se adaptan especialmente bien al tipo de persona romántica; aunque, como es lógico, hay que tener en cuenta que hay tipos de personalidades mixtas.



EL TIPO ROMÁNTICO

Estas personas son tranquilas y soñadoras. A menudo parecen delicadas y frágiles; son naturales y calmadas. Toman sus decisiones fiándose de su instinto.

Ofrece también a sus clientes la posibilidad de probar la nueva colección de Silhouette cómodamente en su casa. Con el **VIRTUAL MIRROR** basta con subir una fotografía digital y probarse virtualmente las gafas que se deseen en el propio rostro. Sus clientes quedarán fascinados al ver lo fácil que es crear un modelo Silhouette personalizado con unos simples clics de ratón.
www.silhouette.com/virtualmirror

Color de los ojos



Color de la varilla

Tono de piel

00-000
SILVER-PURPLE
DRISAMS

20-001
IVORY-GOLD
GLAMOUR

40-003
BROWN
ELEGANCE

80-004
GREY-GOLD
SHADOWS

trio

caldo

caldo

trio



Golden Circle Ajustes

Si necesitase ayuda o información más detallada sobre la variedad de formas y medidas disponibles, el servicio de atención al cliente de Silhouette estará encantado de asesorarle siempre que lo desee.

DESMONTAJE DE VARILLA



1. Sujetar los laterales de titanio.
2. Sacar el terminal de la bisagra completamente en línea recta.

NOTA: La fuerza debe hacerse solo hacia atrás.

FIJACIÓN DE LA BISAGRA BLS



Poner la bisagra BLS a los dos lados del codo ajustando la forma al hueco y al perno oval.


NOTA: La forma oval del sistema de enganche del BLS garantiza una correcta posición.

ENGRASAR LA BISAGRA



Engrasar el interior del hueco de la bisagra con el lubricante de alta precisión. Si es necesario, limpiarlo antes. Poner los BLS. Montar la varilla.

PERFORACIÓN MANUAL CON PLANTILLA - "LENTES NEGATIVAS"

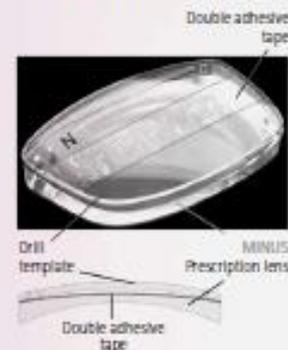


1. Enganchar la pegatina de doble cara horizontalmente.
2. Enganchar la plantilla de perforación sobre la lente graduada.

MONTAJE DE VARILLAS



Poner la varilla exactamente en la ranura de la bisagra BLS y acompañarla con cuidado hasta el tope para encajarla correctamente.

INCLINACIÓN - DOBLE CODO

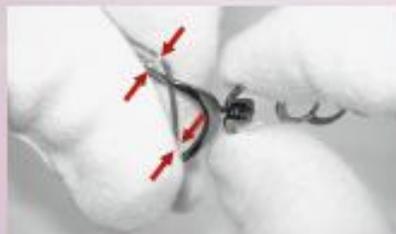

1. Sujetar firmemente la fijación de las lentes arriba y abajo.
2. Abrir completamente la varilla.
3. Insertar la varilla con firmeza, empezando con los BLS, e inclinar hacia la hendidura de la bisagra.

PERFORACIÓN MANUAL CON PLANTILLA - "LENTES POSITIVAS"

TEMPORAL



NASAL



1. Enganchar adhesivo de doble cara verticalmente.
2. Enganchar la plantilla de perforación sobre las lentes graduadas.

TALADRAR



1. Taladrar con \varnothing 1,4 mm.
2. 90° Hacia el frontal de la lente graduada.
3. Usar base curvada para taladrar.
4. Pulir con cuidado.

BLS – ENSANCHAR



Ensanchar los BLS cuidadosamente con una objeto afilado, para poder presionar y centrar las partes de la gafa con más facilidad.


MONTAJE EN 2 PASOS



1. Situar la parte móvil de los alicates de montaje encajando exactamente en la cabeza de los BLS y presionar hacia la lente.

NOTA: No es importante que BLS se montan primero.

BLS – INSERTAR Y CORTAR A MEDIDA

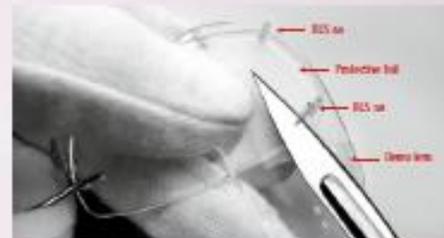

1. Enganchar la cinta protectora en la lente graduada.
2. Insertar los BLS desde el interior hacia el exterior hasta el tope. Consejo: Usando talcos de presentación en la parte interna, evitaremos que los BLS se deslicen.
3. Sólo entonces, cortar los BLS de acuerdo al grosor de la lente. Poner la cuchilla paralela al frontal de la lente.

PREMONTAJE MANUAL DE LAS PARTES DE LA GAFAS



1. Poner los 3 pernos de la gafa en los taladros al mismo tiempo.



2. Presionar los pernos ligeramente hacia dentro.

Consejo: Usando talcos de presentación en la parte interna, evitaremos que los BLS se deslicen.



2. Aguantar contra-presión la parte móvil de los alicates. Cerrarlos solo después, y presionar los pernos completamente hacia dentro, hacerlo suavemente de una vez.

APERTURA DE LA VARILLA – DOBLE CODO



Reducir


Sujetar firmemente la fijación de la lente en ambos lados del codo. Presionar contra el borde la mesa.



Ampliar

Sujetar firmemente la fijación de la lente en ambos lados del codo. Insertar la bisagra, incluidos BLS, y presionar hacia fuera.

INCLINACIÓN – CODO SENCILLO

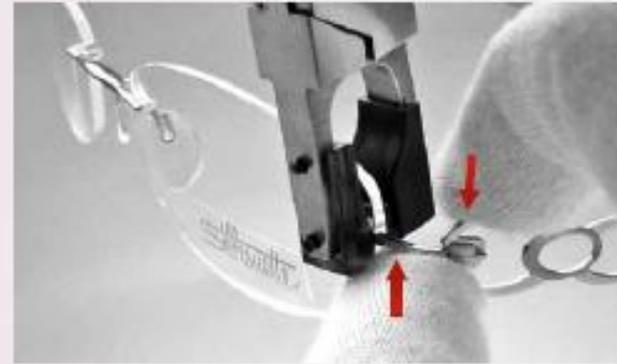

1. Sujetar firmemente la fijación de la lente con los alicates de montaje.
2. Inclinar los laterales de la gafa con el brazo de palanca corto, entre el principio de la varilla y los laterales, para liberar la presión de la bisagra. Asegurarse de no doblar la varilla.

CONSEJO: Ajustar la inclinación antes del montaje óptico con las lentes de montaje de prueba.

APERTURA DE LA VARILLA – CODO SENCILLO



Reducir



Ampliar



Curvar la varilla con movimientos largos. No calentar. ¡No doblar!