

Silhouette®
VISIÓN SIN LÍMITES



TITAN
elements

fact book



4

PUNTO DE VENTA:
TITAN ELEMENTS, UNA PUESTA
EN ESCENA PERFECTA

6

TITAN ELEMENTS:
AJUSTES

TITAN ELEMENTS


Ajustes

INCLINACIÓN DE LA VARILLA



1. Sujetar firmemente la fijación de las lentes.
2. Inclinar, con cuidado en este punto.

APERTURA DE LA VARILLA

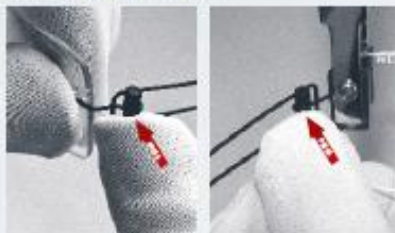

Reducir

Ampliar

EXTRAER EL TERMINAL



Presionar suavemente los primeros 2 cm del terminal con unos alicates planos, en los laterales y en la parte de arriba y de abajo, para que se desprenda la fijación de la cola. De esta manera se puede extraer fácilmente el terminal.

NOTA: Debido al diseño de la varilla y del terminal no es posible reducir su longitud.

DESMONTAJE DE LA VARILLA



1. Sujetar firmemente la fijación de la lente.
2. Cerrar la varilla a la mitad.



3. Presionar el cilindro hacia fuera de la curva de la bisagra (SNAP-hinge). De ese modo, el efecto de la presión será justo al lado de la bisagra.

ATENCIÓN: No doblar la varilla

CURVATURA DE LA VARILLA



Ensanche la varilla con largos movimientos.
No doblar.